

## קיצור דרך כללי

- Shift + I גודל כלי המידול
- Cmd / Ctrl + I עוצמת כלי המידול
- גזור הבחירה עם המברשת
- Shift + גזור ביטול בחירה עם המברשת
- Cmd / Ctrl + Z ביטול
- Cmd / Ctrl + Y ביצוע חוזר

## הגדרות של תצוגת תלת-ממד

- סיבוב בתלת-ממד \*
- הגדלה/הקטנה של התצוגה או
- ניתן ללחוץ להגדרת מרכז סיבוב נפח
- תצוגה פנורמית בתלת ממד או +

## CAD בלבד

- שינוי קנה המידה של נקודת המגע
- F1 + fn / F1 + הסתרת האובייקט התלת-ממדי שלחצת עליו \*\*
- F2 + fn / F2 + שינוי השקיפות של האובייקט התלת-ממדי שלחצת עליו \*\*
- F3 + fn / F3 + הצגת האובייקט המוסתר האחרון \*\*
- Cmd / Ctrl + סיבוב השן
- Shift + שינוי קנה המידה של השן
- Cmd / Ctrl + Shift + מתיחת השן
- Shift + בחירת שיניים מרובות ב-Dentogram



RealGUIDE™  
מערכת אוניברסלית פתוחה

\* כברירת מחדל; יש להגדיר תחת Settings/General (הגדרות/כללי) בפרויקט ולהשבית את הלחצן Use Left Mouse [...] (שימוש בלחצן העכבר השמאלי [...])

\*\* כברירת מחדל; יש להגדיר תחת Settings/General (הגדרות/כללי) בפרויקט



אפשר גם להפעיל את מקשי הפונקציות (F1, F2, F3) במערכת הפעלה של Mac כדי להשתמש רק בהם. יש לבחור בתפריט System < Apple (מערכת) Preferences (העדפות) < לבחור Keyboard (מקלדת) < ללחוץ על Keyboard (מקלדת) < יש להפעיל את האפשרות Use F1, F2, etc... as standard function keys (שימוש ב-F1, F2, וכו'... כמקשי פונקציות סטנדרטיים)