

INSTELLINGEN 3D VIEWER

-  3D-rotatie *
-  In-/uitzoomen
-  Klik om het rotatiecentrum voor het volume in te stellen
-  3D-pannen

ALGEMENE SNELKOPPELINGEN

- Aanpassing grootte van hulpmiddel  + 
- Aanpassing sterkte van hulpmiddel  +   /  
- Selectie van gebied met penseel 
- Deselectie van gebied met penseel  + 
- Ongedaan maken  +   /  
- Opnieuw uitvoeren  +   /  




RealGUIDE™
UNIVERSAL OPEN SYSTEM

ALLEEN CAD

- De contactschaal wijzigen 
- Het aangeklikte 3D-object verbergen **  +   /   + 
- De aangeklikte 3D-objecttransparantie wijzigen **  +   /   + 
- Het laatst verborgen object weergeven **  +   /   + 
- Tand draaien  +   /  
- Schaal van tand aanpassen  + 
- Tand uitrekken  +  +   /  
- Meervoudige tandselectie in dentogram  + 

* standaard; u kunt dit aanpassen bij Project Settings/General (Projectinstellingen/Algemeen) door de optie 'Use Left Mouse [...]' (Linkermuisknop gebruiken) uit te schakelen

** standaard; u kunt dit aanpassen bij Project Settings/Shortcut (Projectinstellingen/Snelkoppeling)

 U kunt in het Mac-besturingssysteem ook ALLEEN de functietoetsen (F1, F2, F3) gebruiken door deze in te schakelen. Selecteer in het Apple-menu achtereenvolgens System > Preferences > Keyboard (Systeem > Voorkeuren > Toetsenbord) en klik op Keyboard (Toetsenbord). Schakel 'Use F1, F2, etc... as standard function keys' (F1, F2, enz... als standaardfunctietoetsen gebruiken).

 ZimVie